

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	67370.1	Fecha de Mantenimiento:	2026-03-24
Propietario:	CENTRO DE DIÁLISIS CONTIGO S.A. DIALICON	Técnico de Mantenimiento:	Jonathan Fonseca
Dirección:	SOLANDA / AV. TENIENTE HUGO ORTIZ OE2-445 Y QUIMIAG		

1. Datos

Equipo:	Desfibrilador	Código empresa:	*****
Marca:	PHYSIO-CONTROL	Rango:	0 a 360 J
Modelo:	LIFEPAK 9P	División de escala:	*****
Serie:	00015916	Ubicación:	*****

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
---------------------	--------------	--------------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (PASS)

Detalles:

En esta etapa se realiza la inspección visual del desfibrilador monitor multiparámetro PHYSIO-CONTROL modelo LIFEPAK 9P, verificándose que el equipo no presenta daños físicos, fisuras, golpes ni deterioro en su estructura. Los cables, conectores, paletas y accesorios se encuentran en condiciones adecuadas, sin evidenciar desgaste significativo, por lo que se procede a la siguiente etapa.

4.2. Segundo Escalón:

4.2.1. Verificación del funcionamiento del equipo. (PASS)

Detalles:

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	67369.1
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2026-03-24

Produced by: Jo
Approved by: M



eca – Maintenance Technician
z, Eng. – Technical Manager

Se procede a realizar pruebas funcionales del equipo, verificando su correcto encendido, navegación por el sistema y operación de sus funciones principales. Se comprueba el funcionamiento del módulo de monitoreo, visualización de parámetros y respuesta de los controles. El equipo responde de manera adecuada, sin presentar fallas durante la evaluación, por lo que se determina que se encuentra operativo y en condiciones normales de uso.

5. Conclusiones

- 5.1. El equipo se encuentra en buenas condiciones físicas y funcionales.
- 5.2. No se evidencian fallas durante el mantenimiento preventivo, por lo que el desfibrilador se encuentra operativo y apto para su uso.

6. Recomendaciones


- 6.1. Realizar verificaciones periódicas del estado de los accesorios y conexiones.
- 6.2. Mantener el equipo limpio y protegido de polvo y humedad.
- 6.3. Evitar golpes o manipulación inadecuada del equipo.
- 6.4. Ejecutar mantenimiento preventivo de forma periódica para asegurar su correcto funcionamiento.

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:



Jonathan Fonseca
Técnico de mantenimiento

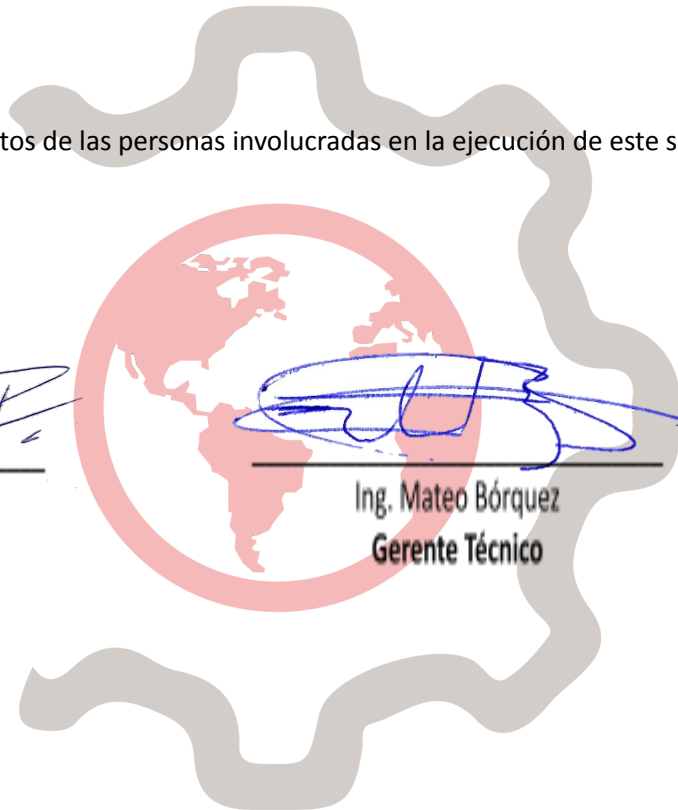

Ing. Mateo Bórquez
Gerente Técnico

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 67369.1
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2026-03-24

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico



Figura 1. Vista General del Equipo.

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 67369.1
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2026-03-24

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager